



Su médico ha colocado uno de los siguientes marcadores de tejido mamario ULTRACLIP® en el lugar de la biopsia mamaria.



Cinta



Ala



Bobina



Tamaño real

Cada marcador de tejido mide sólo 3 mm (menos de 1/8"). Tras la realización de la biopsia mamaria se coloca un marcador de tejido mamario a fin de ayudar a ubicar el lugar para referencia futura. Durante el procedimiento de biopsia mamaria es posible que se extraiga la mayor parte de la lesión, la que podría ser muy difícil de ubicar después. Por lo tanto, se ha convertido en práctica estándar que el médico coloque un marcador de tejido mamario en el lugar de la biopsia para referencia futura. Marcar el lugar también ayuda a asegurar que la biopsia se haya realizado en la zona correcta.

Los marcadores están fabricados de materiales que aparecerán en la mamografía de seguimiento. La presencia del marcador puede ser muy reconfortante cuando se ve en las mamografías de seguimiento pues indica exactamente dónde se realizó la biopsia. Esto puede evitar futuras biopsias en la misma zona.



Preguntas frecuentes

P. *¿Es seguro el marcador?*

R. Sí, el marcador se ha probado y ha demostrado ser seguro y eficaz.

P. *¿El marcador activará detectores de metal en el aeropuerto?*

R. No, el marcador sólo mide 3 mm y no activará detectores de metal.

P. *¿Sentiré el marcador?*

R. El marcador sólo mide 3 mm y es poco probable que lo sienta.

P. *¿El marcador se moverá?*

R. Una vez que el marcador se coloca es poco probable que se mueva. Los marcadores están diseñados para fijarse al tejido mamario y evitar su migración. El marcador no se desplazará a otras partes del cuerpo.

P. *¿Me podré realizar resonancias magnéticas?*

R. Sí, el marcador puede someterse de forma segura a resonancias magnéticas bajo las condiciones apropiadas. Comuníquese al médico que realizará la resonancia magnética que usted tiene un implante de marcador de tejido mamario.

P. *¿Cómo se extrae el marcador de la mama?*

R. El marcador está diseñado para implantarse de manera permanente en la mama y sólo se extraerá si la lesión se extrae quirúrgicamente.

P. *¿Me colocaron un marcador porque tengo cáncer?*

R. No, el marcador tiene por propósito identificar el lugar de la biopsia. El marcador ayuda a confirmar que la biopsia se realizó en la zona correcta.

P. *¿A quién debo contactar si tengo preguntas adicionales?*

R. Si tiene preguntas o inquietudes adicionales hable con su médico.